

Alerta de Seguridad 0020

Canulas para traqueostomia

Código del Reporte: 0020

Agosto , 1997

Equipo medico: Cánulas para traqueostomía [14-089], Lote 920820, del No. 8

Fabricante: Procedente de China

Problema:

Pacientes en Unidades de Terapia Intensiva con Cánulas para traqueostomía que la parte blanca que se adosa al ventilador, si los mismos la necesitaran ser acoplados esta cristalizada y frágil y al acoplarse al equipo se parte pudiendo provocar que las fracciones plásticas puedan ir a la traquea o al pulmón peligrando la vida del paciente. Este evento sucedido frecuentemente con este lote.

Resultados de la investigación:

Aunque con cierto retraso se pudo visitar la fuente para desarrollar la investigación correspondiente. No fue posible obtener ninguna muestra. Se nos informó que ese producto en la actualidad esta casi en cero, que el evento no llevo a producir daño a ningún paciente, que no se ha manifestado con otros lotes, que en estos momentos utilizan cánulas metálicas

Acciones:

1. En caso de poseer cánulas para traqueostomía de ese Numero de lotes, prohibir su uso.
2. Si posee ese tipo de Cánula, pero de otro Numero de Lote, verifique su fecha de vencimiento y su estado físico, si se detecta alguna anomalía repórtelo por este sistema de reportes.

Fuente de Información: SNS

Distribuidas: Coordinadores de Seguridad, Jefaturas de Enfermeria, Jefes de Servicio

El Centro de Control Estatal de Equipos Médicos mediante el Programa de Reporte Usuario REM tiene la función de monitorear los eventos adversos relacionados con equipos médicos.

Centro de Control Estatal de Equipos Médicos CCEEM

Unidad de Vigilancia

Calle 4 No. 455 (altos) e/ 19 y 21. Plaza de la Revolución.
Ciudad de La Habana. C.P. 10400

Teléfono: Línea Caliente (Directo):835-3889 y Pizarra: 832-5072 y 832-7217

E-Mail: rem@cceem.sld.cu

Fax: 638-1930

Aprobado por:



Ing. Dulce Ma. Martinez Pereira
Directora

!